



به ارتقای سلامت  
جامعه متعهدیم



خیابان احمد قصیر (بخارست)  
خیابان هشتم، پلاک ۳، واحد ۱

۰۲۱-۸۸۵۳۸۷۰۰ - ۰۲۱-۸۹۳۳۸۵۰

WWW.FTJ.IR

foratebjarrah



# WOUND DRESSING

## پانسمان



### عناوین

#### پانسمان هیدروکلوفید

- . اکستراتین (هیدروکلوفید شفاف)
- . بردردار (هیدروکلوفید ضخیم)

- . بردردار ساکروم (هیدروکلوفید ضخیم ساکروم)

#### پانسمان فوم

- . پانسمان فوم پلی اورتان دور چسب دار / بدون چسب
- . پانسمان فوم سیلیکونی دور چسب دار / بدون چسب

#### پانسمان آماده

- . پانسمان آماده جهت عروق محیطی (چسب آنتیوکت)
- . پانسمان استریل آماده
- . پانسمان استریل آماده ضد آب

## پانسمان هیدروکلوفید

نام محصول	سایز	تعداد در جعبه	موارد استفاده	طريقه مصرف
اکستراتین (هیدروکلوفید شفاف)	10 * 10 cm 15 * 15 cm 60 * 20 mm			
100, 20 pcs in Box 2000, 1200, 800 pcs in Carton			<ul style="list-style-type: none"> <li>. زخم‌های تمیز و غیر عفونی با ترشحات کم</li> <li>. زخم‌های فشاری (زخم بستر)</li> <li>. مرحله اپیتلیزاسیون روی سوچور جراحی به نوان پانسمان ثانویه روی هیدروژل</li> <li>* در افراد دیابتیک توصیه نمی‌گردد.</li> </ul>	
پانسمان هیدروکلوفید باید ۱ الی ۲ اینچ بزرگتر از زخم انتخاب شود.				

## ☞ احتیاط:

جذب ترشحات به صورت عمودی می‌باشد.  
تعویض پانسمان بدون در دو تروماتیزاسیون است.



## Hydrocolloid Dressing

### پانسمان هیدروکلوفید

پانسمان هیدروکلوفید، پانسمان‌هایی Semi Occlusive ساخته شده ژلاتین یا پکتین و یا کربوکسی متیل سلولز می‌باشند.

این پانسمان‌ها با ایجاد یک محیط مرطوب و استریل و غیر قابل نفوذ به باکتری‌ها، محیط مناسبی برای ترمیم زخم ایجاد می‌کنند.

پانسمان‌های هیدروکلوفیدی یک محیط ترمیم مناسب و استریل جهت زخم‌های غیرعفونی فراهم می‌کند.


این پانسمان‌ها حاوی CMC (کربوکسی متیل سلولز) هستند، که در تماس با زخم تشکیل ژل می‌دهند. لایه بیرونی حاوی پلی اورتان در ضخامت‌های مختلف موجود است، این پانسمان‌ها نسبت به باکتری نفوذ ناپذیر می‌باشند. اما امکان و تیلیزاسیون را برای زخم فراهم می‌کند.



## پانسمان هیدروکلوریک

## پانسمان هیدروکلوریک

نام محصول	بردردار ساکروم (هیدروکلوریک ضخیم ساکروم)
سایز	15 * 18 cm
تعداد در جعبه	5 pcs in Box 400 pcs in Carton
موارد استفاده	. موارد استفاده مناسب زخم‌های فشاری با ترشحات کم پانسمان مناسب برای ساکروم و تروکاتر ★ در افراد دیابتیک توصیه نمی‌گردد.
طريقه مصرف	پانسمان هیدروکلوریک باید ۱ الی ۲ اینچ بزرگتر از زخم انتخاب شود.

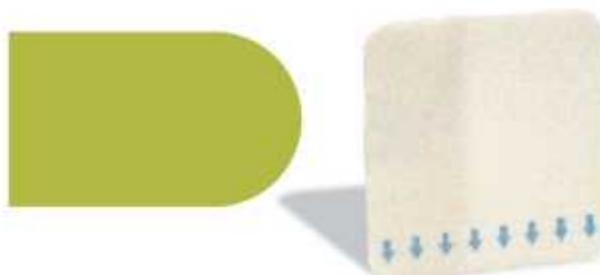


نام محصول	بردردار (هیدروکلوریک ضخیم)
سایز	10 * 10 cm 15 * 15 cm
تعداد در جعبه	10 pcs in Box 400, 600 pcs in Carton
موارد استفاده	. مناسب زخم‌های فشاری با ترشحات کم زخم در مرحله گرانولیشن . ضد آب و باکتری . در افراد دیابتیک توصیه نمی‌گردد
طريقه مصرف	پانسمان هیدروکلوریک باید ۱ الی ۲ اینچ بزرگتر از زخم انتخاب شود.



## پانسمان فوم

نام محصول	سایز	تعداد در جعبه	ویژگی	طریقه مصرف
فوم پلی اورتان دور چسبدار / بدون چسب				
10 * 10 cm 15 * 15 cm	سایز			
10 pcs in Box 200 pcs in Carton		تعداد در جعبه		
. فوم جاذب، غیر چسبنده، ضد باکتری . پد محافظ جاذب خارجی با افزایش سرعت انتقال بخار مرطوب . اطراف زخم را از له شدگی محافظت می کند.			ویژگی	
. شستشو زخم با محلول شستشوی زخم مناسب . لایه شفاف محافظ فقط از روی پانسمان جدا شود . مستقیماً روی زخم گذاشته شود و در صورت نیاز میتوان با قیچی استریل به اندازه سایز زخم برش دهید.				طریقه مصرف

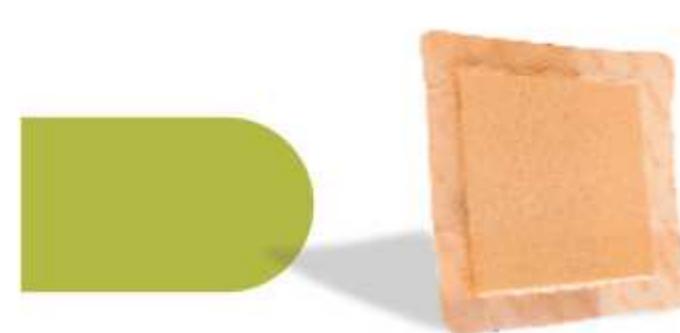

# Foam Dressing

## پانسمان فوم

. مناسب برای زخم با ترشحات نسبتاً زیاد  
جذب ترشحات به صورت عمودی  
. استفاده به جهت کم کردن فشار از روی  
بافت و پیشگیری از ایجاد زخم بستر




## پانسمان فوم سیلیکونی

نام محصول	سایز	تعداد در جعبه	ویژگی	طريقه مصرف
فوم سیلیکونی دور چسب دار / بدون چسب				
10 * 10 cm 15 * 15 cm	سایز	pcs in Box 10 pcs in Carton 200		
. فوم جاذب پلی اورتان (PU)، ضد باکتری، غیرچسبنده سیلیکونی . مناسب زخم های فشاری . پد محافظ جاذب خارجی با قابلیت تنظیم میزان تبخیر رطوبت (MVTR) با توجه به میزان ترشحات باری جلوگیری از له شدگی زخم و اطراف آن . ایجاد تعادل رطوبت، یهود و ترمیم زخم به دلیل وجود لایه سیلیکونی . تعویض پانسمان بدون درد و ترومازیسیون	ویژگی			
. آماده سازی زخم و شستشو زخم با محلول شستشوی زخم مناسب . جدا کردن لایه شفاف از روی پانسمان . قرار دادن مستقیم بر روی زخم و ثابت نگه داشتن آن توسط پانسمان ثانویه		طريقه مصرف		



در مدل های دور چسب دار نیاز به پانسمان ثانویه نیست

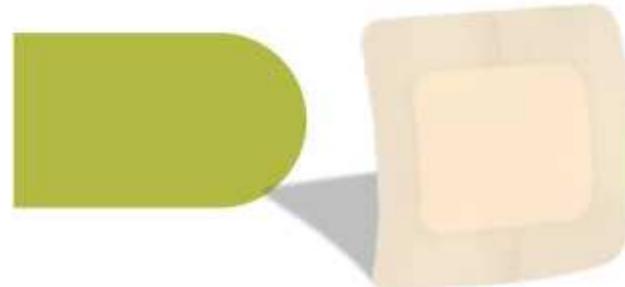

## Silicone Foam Dressing

### پانسمان فوم سیلیکونی



- . فوم سیلیکونی با میزان تبخیر مناسب (MVTR) و ایجاد محیط مرطوب.
- . جذب ترشحات زخم به صورت عمودی.
- . به حداقل رساندن خطر آسیب به پوست اطراف زخم



## Disposable Sterile Dressing

پانسمان استریل آماده

پانسمان استریل آماده		نام محصول
سایز	تعداد در جعبه	ویژگی
10 * 10 10 * 15 10 * 20	10 * 25 10 * 30 10 * 35 cm	
25 pcs in Box 1000 pcs in Carton 500 pcs in Carton 300 pcs in Carton		
. کاهش ریسک عفونت جراحی . پانسمان Non_Woven و ضد حساسیت . دارای پد دولایه با قدرت جذب بالا . تعویض بدون درد با کمترین آسیب رسانی به رخم . پوشش آماده و سریع زخم‌های سطحی و انسرزیون جراحی		



## Non\_Wound Dressing

پانسمان آماده جهت عروق محیطی

(چسب آنتیبکت)

چسب آنتیبکت	نام محصول
تعداد در جعبه	ویژگی
6 * 8 cm 50 pcs in Box 2500 pcs in Carton	سایز پانسمان ۶*۸ cm و پد
. پانسمان Non_Woven و ضد حساسیت . مناسب برای ثابت نگه داشتن کاتترهای محیطی (IV)	



# Waterproof Wound Dressing With Pad

پانسمان ضد آب استریل

نام محصول	پانسمان ضد آب استریل
سایز	10 * 10    10 * 15    10 * 20    10 * 25    10 * 30    10 * 35
تعداد در جعبه	25 pcs in Box 1000 pcs in Carton 500 pcs in Carton 300 pcs in Carton
ویژگی	<ul style="list-style-type: none"> <li>. کاهش ریسک عفونت جراحی</li> <li>. دارای پد دولایه با قدرت جذب بالا</li> <li>. غیر قابل نفوذ نسبت به آب و باکتری</li> <li>. تعویض بدون درد با کمترین آسیب رسانی به زخم</li> <li>. قابل استفاده در محل آنتیوگرافی و انواع جراحی:</li> <li>(لایپراتومی، سزارین، ارتودنسی و لایپراسکوپی)</li> <li>. امکان شستشو بدون آبرسانی به محل جراحی</li> </ul>



